

Ocutears®

(nátrium-hialuronát oldat 0,15%)

Leírás

Az Ocutears steril, tartósítószerrel nem tartalmazó, viszkoelasztikus műköny, amely átlátszó védőréteget képez a szaruhártyán.

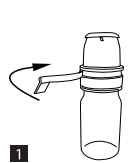
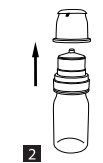

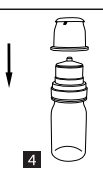

Kizárólag természetes, biológiai anyagokból áll. Az Ocutears a természetes könny hatását utánozza, védi, nedvesíti és síkosítja a szem felszínét. Ezáltal hosszan tartó enyhülést eredményez az alábbi okokból bekövetkező szemszárazság esetén:

- Keratoconjunctivitis sicca (Sjögren-szindróma)
- A szaruhártya sérülései, eróziója, szaruhártya műtét
- Kontaktlencse viselése
- Hormonális zavarok (menopauza)
- Légkondicionálás, szél, hideg, száraz hőség, por, füst, légszennyezés
- Számítógép képernyője előtt végzett munka, hosszú autózvezetés, hosszú repülőutak
- Úszás klórozott vízben

Alkotóelemek

Nátrium-hialuronát (0,15%), nátrium-klorid, nátrium-hidrogén-foszfát, nátrium-dihidrogén-foszfát és tisztított víz

Használati útmutató


 <p>1</p>	<p>Az első használat előtt tépje le a kupakról a biztonsági gyűrűt; ettől az időponttól kezdve az Ocutears legfeljebb 6 hónapig használható fel.</p>	 <p>2</p> <p>Távolítsa el a kupakot.</p>
 <p>3</p>	<p>A flakon oldalait összenyomva cseppentsen egy cseppet közvetlenül a szembe vagy a kontaktlencsére.</p>	 <p>4</p> <p>Használat után helyezze vissza a kupakot a flakonra; a felbontás után 6 hónappal a flakont a háztartási hulladékkal együtt kell megsemmisíteni.</p> 

A termék gyorsabban szétoszlik a szem felszínén, ha a becseppentés után becsukja a szemét, és gyengéden masszírozza a szemhéjait.

Tárolás

2 – 25 °C között tárolandó. Ne fagyassza le.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

- Ne használja, ha a kupak biztonsági gyűrűje sérült.
 - Ne érintse a flakon cseppentőnyílását a szeméhez.
 - A szennyeződés veszélye miatt ne érintse a flakon cseppentőnyílását más felületekhez vagy a kezéhez.
 - Ne használja együtt más szemészeti készítményekkel. Ha más szemcseppet is használ, akkor az Ocutears használata előtt várjon legalább 5 percet.
 - Ne cseppentsen fertőzött szembe.
 - Használat után ideiglenesen csökkenhet a látásélesség; ebben az esetben ne vezessen gépjárművet, ne működtessen gépeket, hanem várjon amíg helyreáll a normális látás.
 - Írja rá a flakonra a felbontás dátumát.
 - 6 hónappal a kupak zárógyűrűjének eltávolítása után a flakont a háztartási hulladékkal együtt meg kell semmisíteni.
- 

Kiszerezés

10 ml

Értékesítés és forgalmazás Magyarországon

Santen Oy, Tampere, Finland

Gyártó

i.com medical GmbH
Kaflerstrasse 15
81241 München, Germany